


## GUIDA RAPIDA PER BVI 6100 & BVM 6500

Nota : per accendere il sistema di scansione, quando esso è nella modalità "sleep", premere e rilasciare qualunque tasto ed aspettare il cicalino.


### 1 Selezionare il sesso

(Selezionare l'opzione femmina SOLO per pazienti femmina che non abbiano subito un'isterectomia)


Selezione sesso

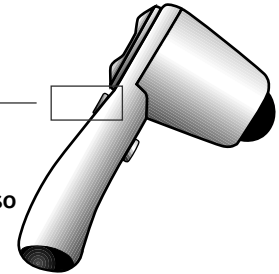


### 2 Applicare Sontac® Gel Pad

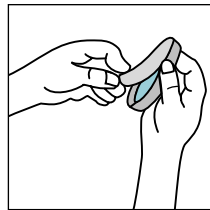

aprire la confezione di gel

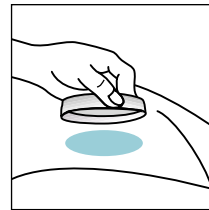


Porre il gel pad sull'addome del paziente 2,5 cm ca. sopra la sinfisi pubica

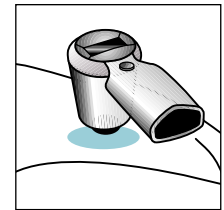

Porre la testina sul gel pad

### 3 Puntare alla vescica

Puntare la testina leggermente verso il basso in direzione del coccige (osso sacro)

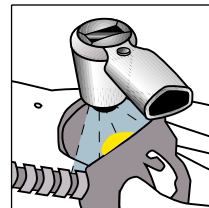

Puntare alla vescica

### 4 Premere il tasto scansione


### 5 Verificare il puntamento

### 5A Frecche lampeggianti= Ri-Puntare




Frecche lampeggianti

Esempio:

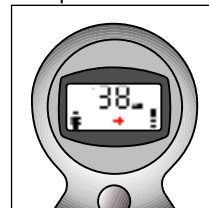

1) la freccia indica sinistra

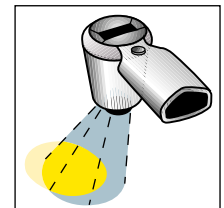


2) puntare a sx e riscannerizzare

### 5B Frecche fisse o nessuna freccia= Accettare la scansione Non necessario ri-puntare



Frecche fisse o nessuna freccia

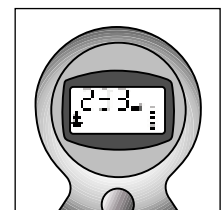


BVI 6100



BVM 6500

## GUIDA RAPIDA PER BVI 6100 & BVM 6500

**Nota:** per accendere il sistema di scansione, quando esso è nella modalità "sleep", premere e rilasciare qualunque tasto ed aspettare il cicalino.

- 1** Premere il **Tasto selezione sesso**, posto sotto lo schermo LCD, per selezionare o deselegionare l'opzione femmina. Quando l'opzione femmina è selezionata, appare una **Icona Femmina** sul display. Usare l'opzione femmina quando si stia scansionando una femmina che non abbia subito isterectomie; per tutti gli altri pazienti, premere il tasto selezione sesso finché non appaia alcuna icona.
- 2** Palpare la sinfisi pubica del paziente. Posizionare un Sontac® ultrasound gel pad sulla linea mediana dell'addome, ca. 2,5 cm sopra la sinfisi pubica.
- 3** Posizionare la testina (parte tonda a cupola dell'unità) sul Sontac gel pad, punta puntata nella presunta direzione della vescica. Per la maggioranza dei pazienti, ciò significa puntare leggermente in basso in direzione del coccige.
- 4** Premere e rilasciare il **Tasto Scansione**, posto nella parte inferiore dell'impugnatura dello strumento. Appare un simbolo  di scansione all'angolo sup. dx del display durante la scansione.

Mantenere ben ferma l'unità fino a fine scansione. Quando sentirete un beep, la scansione è completata e la misurazione del volume vescicale viene mostrata sul display.
- 5** Verificare che l'unità fosse correttamente puntata tramite le **Frecce di puntamento** lampeggianti.
- 5A** Se appaiono frecce lampeggianti sul display, al di sotto della misura del volume vescicale, dovete ripuntare in direzione della freccia lampeggiante. Visualizzate le onde ultrasoniche che escono dalla testina attraverso il corpo del paziente. Se la freccia lampeggiante punta a sinistra puntate l'unità in modo tale che le onde ultrasoniche siano proiettate più a sinistra. Quindi, ri-scansionate il paziente. Ripetere tante volte quanto necessario, finché appaia una freccia fissa o non appaia alcuna freccia sul display.
- 5B** Il volume vescicale misurato è accurato solo quando non appaia alcuna freccia di puntamento o solo frecce fisse dopo la scansione sul display. Annotate il volume vescicale del paziente. L'unità non salverà la misurazione dopo che avrete iniziato una nuova scansione.



BVI 6100



BVM 6500

[www.dxu.com](http://www.dxu.com)

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

DU Corporate Headquarters: 21222 30th Dr SE, Ste 120, Bothell, WA 98021, USA  
European Office: Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA, IJsselstein, The Netherlands