


LOPRO 或 GVL 视芯套


的插管方法

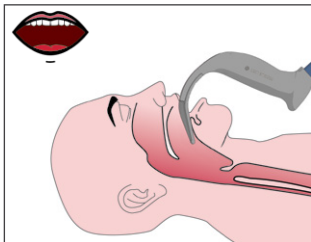


- 1 沿舌头中线插入叶片，推进叶片头端，直至超过舌头的后部。




- 2 找到会厌并将叶片伸到会厌谷中，以看清喉部。

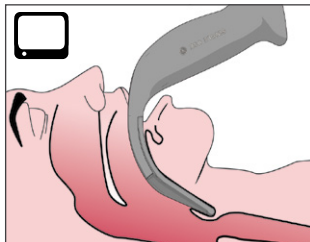


- 3 沿叶片的右侧插入 ET 导管。

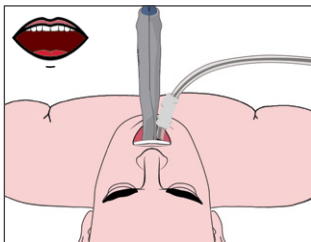


- 4 完成插管。

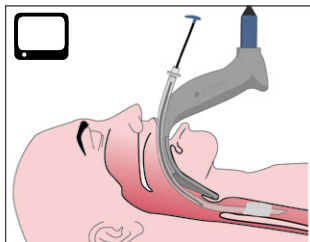

- 5 要取出 GlideRite 管芯，朝患者脚部方向将其拉出。

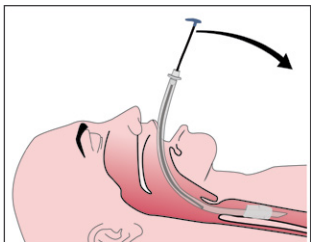

 — 执行步骤时查看口腔。

 — 执行步骤时查看显示屏。



重要说明：本文档仅供快速参考。有关完整说明，请参阅 verathon.com/product-documentation 上的“操作和维护手册”。



Verathon Medical (加拿大) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9
加拿大
电话：+1 604 439 3009
传真：+1 604 439 3039



Verathon Medical (欧洲) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam,
荷兰
电话：+31 (0) 20 210 30 91
传真：+31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (澳大利亚), Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
澳大利亚
澳大利亚境内：
1800 613 603 电话 / 1800 657 970 传真
国际：
+61 2 9431 2000 电话 / +61 2 9475 1201 传真



GlideRite、Verathon 及其各自的符号是 Verathon Inc. 的商标。
所有其它品牌和产品名称均是其各自所有者的商标或注册商标。
© 2021 Verathon Inc.



0900-4511-ZHCN Rev-01